

INMOVILIZADOR LATERAL MACAYA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Dispositivo para la inmovilización de la cabeza destinado a ser utilizado con tableros espinales o camillas tijeras.
- Se puede utilizar junto con otros dispositivos de inmovilización y collarines cervicales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


1. Material:

- Materiales PE, PVC, Nylon.


2. Información:

- El relleno de la base aumenta la comodidad del paciente.
- Correas frontales y para el mentón ajustables, acolchadas y suaves, de alta adherencia para optimizar la inmovilización.
- Almohadas hechas de material no absorbente para un fácil saneamiento.
- Agujeros de gran volumen para la inspección del oído
- Sus anchas superficies de velcro hacen que el posicionamiento de las almohadas sea más fácil.
- Agujero para la inspección del oído $\varnothing 70$ mm.
- Peso base 360 g.
- Peso almohada 500 g.
- Peso total 1,46 kg.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD:

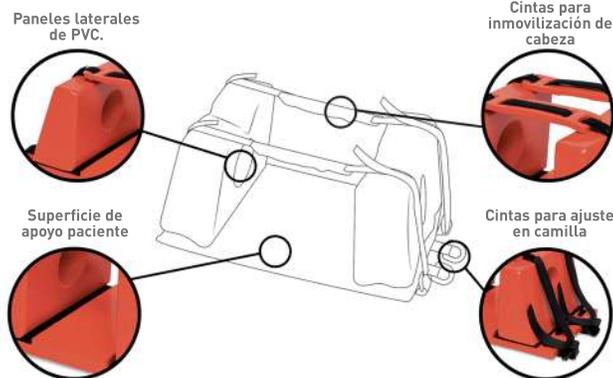

USO DE EQUIPO:

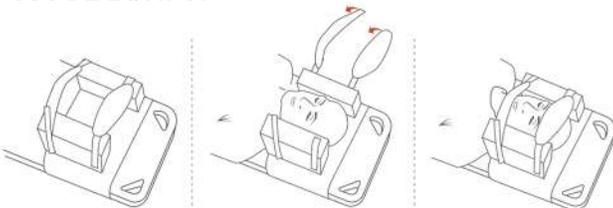

1. Colocar el equipo sobre la camilla y ajustar con las cintas debajo del equipo.

2. Posicionar la cabeza del paciente entre los dos paneles de PVC para inmovilizar el cuello de la víctima.

3. Con las cintas superiores, ajustar contra frente y mentón respectivamente, esto asegura una limitación de los movimientos del cuello.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

- Modificaciones:



- Precauciones de material:



- Almacenamiento:



ISO 9001 :2015 OHSAS 18001 :2007