

# 4800N95

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS  
CON BANDA SMARTSTRAP® Y  
SELLO FACIAL DE ESPUMA




## MÁS AIRE. MÁS USO.

Respiración más fácil y mayor confort son lo que usted consigue cuando usa un respirador AirWave®. Su doble superficie de filtrado y su diseño exclusivo de ondas patentado, permite mayor flujo de aire hacia adentro y hacia afuera del respirador.

## MAYOR COMODIDAD. MAYOR USO. MAYOR DURABILIDAD.

El diseño único de Flexfit® se mueve con su cara para comodidad durante todo el día. La exclusiva SmartStrap® fresca y cómoda permite ajustar el respirador con un ajuste personalizado. La SmartStrap® también permite que el respirador cuelgue alrededor del cuello cuando no esté en uso. Tiene un suave sello de espuma alrededor de la cara para un ajuste sin puntos de presión. Mayor confort significa mayor cumplimiento. La malla Dura-Mesh® evita el colapso al calor y la humedad por lo que su respirador dura por más tiempo. El uso más prolongado significa menos residuos y disminución de costos. Además es libre de metal.


Ajustable

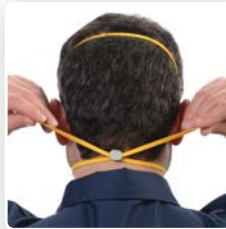

Colgable



Sello Facial de Espuma

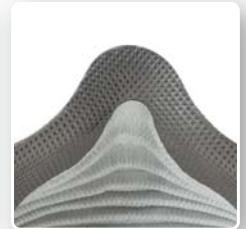

## APLICACIONES DE SERIE N95

Molienda, corte, lijado, Barrido, Elaboración de Metales, Embolsado, Fundiciones, Cantera de piedra, Agricultura, Obras de construcción, Cemento, Fabricación de Cerámica, Minería, Madera, pulido, abrillantado, cal, aves de corral, Textiles, Soldadura.

- Diseño exclusivo de ondas para una respiración más fácil
- 95% de eficiencia contra partículas no aceitosas
- Diseño FlexFit® que se mueve fácilmente con su cara y se queda en su lugar
- Malla Dura-Mesh® resiste colapsarse con el calor y la humedad
- Suave Banda SmartStrap®, es colgable y ajustable
- Sello facial de Espuma para mayor comodidad y sin puntos de presión
- Cumple con resistencia al calor y la flama de acuerdo con ANSI / ISEA 110-2003 Sección 7.11.1
- Libre de metal
- Libre de PVC para una alternativa más ecológica

# 4800N95

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS  
CON BANDA SMARTSTRAP® Y  
SELLO FACIAL DE ESPUMA



## ÚSESE CONTRA:

1. Partículas, aerosoles no aceitosos.

## NO SE USE CONTRA:

1. Concentraciones de contaminantes que son desconocidos o son un peligro inmediato para la vida o la salud.
2. Concentraciones de partículas que superan la concentración máxima de uso o 10 veces el límite de exposición permisible de OSHA, o lo que sea menor.
3. Gases, vapores, asbestos, pintura en aerosol, chorro de arena o partículas de materiales que generen vapores nocivos.
4. Neblinas con base de aceite.

## RESTRICCIONES

1. Este respirador no suministra oxígeno y no debe ser utilizado en atmósferas que contienen menos de 19.5% de oxígeno.
2. No permanecer en el área contaminada si se produce algún malestar físico, por ejemplo, dificultad para respirar, mareos o náuseas.
3. Salga del área contaminada y reemplace el respirador si este se encuentra dañado, deformado, no se ha obtenido un ajuste apropiado o la respiración se vuelve difícil.
4. Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente todo el respirador, incluyendo el medio filtrante y área de fijación de la banda en caso de fisuras o daños. Perforaciones por grapas o en el área de pegado de la banda no afectan el desempeño del respirador.
5. No altere, modifique, o maltrate este respirador.
6. Almacene los respiradores no utilizados en caja / bolsa en un área limpia, seca y no contaminada.
7. Deseche el respirador de acuerdo con la política de su empleador y las regulaciones locales.
8. Use el respirador antes de la fecha de caducidad "use by" impresa en la caja/bolsa.
9. Si se utiliza para soldadura, utilice la protección adecuada para ojos y cara.

## ADVERTENCIAS AL USUARIO

1. Siga todas las instrucciones y advertencias sobre el uso de este respirador y el desgaste durante todo el tiempo de exposición. De no hacerlo, se reducirá la efectividad del respirador, la protección del usuario y puede causar enfermedades o la muerte.
2. Antes de utilizar, el usuario primero debe ser capacitado por el empleador en el uso apropiado del respirador, de conformidad con las normas de seguridad y salud aplicables, para el contaminante y nivel de exposición en el área de trabajo asignada.
3. Las partículas y otros contaminantes que pueden ser peligrosos para su salud incluyen las que usted no puede ver, probar, ni oler.
4. Este producto no se ha vendido con advertencias o instrucciones de uso para el personal involucrado en cuidado de la salud o situaciones relacionadas, donde puede haber la posibilidad de contacto con enfermedades o riesgos biológicos. Si usted está considerando este tipo de usos, primero llamar al Departamento de Servicio Técnico de Moldex, +1 (310) 837-6500 ext. 512/550 o +1 (800) 421-0668 ext. 512/550. En México y América Latina al +52 (442) 2341230 Fax +52 (442) 2341231.

DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES USA

Moldex-Metric, Inc.  
CULVER CITY, CALIFORNIA, 90232  
+1 (800) 421-0668

National Institute for Occupational Safety and Health

THESE RESPIRATORS ARE APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATIONS

TC-	PROTECTION <sup>1</sup>	RESPIRATOR		CAUTIONS AND LIMITATIONS <sup>2</sup>
		4800	4801	
84A-6658	84A-6658	X		A B C J M N O P

**1. Protections**

P95-Particulate Filter (95% filter efficiency level) effective against all particulate aerosols; time use restrictions may apply.

**2. Cautions and Limitations**

- A - Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.
- B - Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
- C - Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
- J - Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
- M - All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable
- N - Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configurations as specified by the manufacturer.
- O - Refer to user's instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
- P - NIOSH does not evaluate respirators as surgical masks.

## Empaque

Modelo #	Descripción	Cantidad	Cartón
4800N95	Respirador Desechable Mediano / Grande N95	8 por Caja	10 Cajas

## GARANTÍA LIMITADA - AVISO IMPORTANTE PARA EL COMPRADOR

Esta garantía limitada se establece en lugar de las garantías de comerciabilidad, idoneidad para fines particulares y todas las demás garantías, expresas o implícitas. No hay otras garantías que se extiendan más allá de la descripción en el texto del presente documento. Los estándares físicos y especificaciones de Moldex serán cumplidos por los productos vendidos

**Remedios exclusivos:** daños por el incumplimiento de esta garantía limitada se limitan a la sustitución de tal cantidad de productos Moldex que se demuestre tener defectos de fabricación. Salvo lo dispuesto anteriormente, Moldex no será responsable por cualquier pérdida, daños, o pasivo, directos, indirectos, incidentales, especiales o consecuentes, que surjan de una venta, uso o mal uso, o la imposibilidad de utilizar los productos por parte del usuario.

## Distribuido Por:



**Moldex México/América Latina**  
Tel. +52 (442) 2341230  
Fax. +52 (442) 2341231  
Email: Ventasamlat@moldex.com  
www.moldex.com/es

**MOLDEX TECHNICAL SERVICE DEPARTMENT:**  
+1 (800) 421-0668 or  
+1 (310) 837-6500 ext. 512/550

